


RapidVet®-H

Canine Blood Typing

Interpretação do Teste Canino

Exemplos de Aglutinação Positiva

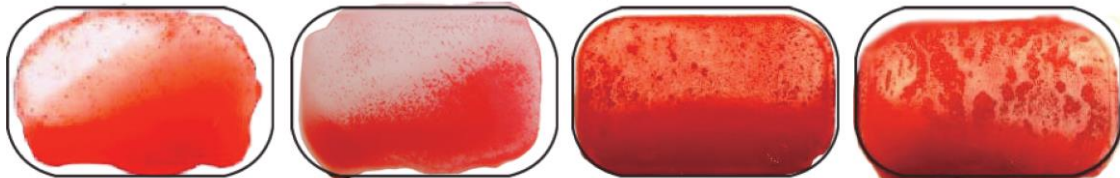

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Se o teste está correto, aglutinações visíveis (veja os exemplos acima) deve ter ocorrido no poço marcado “Positive Control”.

Se a amostra do paciente aglutinou no poço marcado “Patient Test” o cão é DEA 1 positivo. No poço “Auto-Agglutination Pre-Screen” não ocorreu aglutinação. (Auto-aglutinação é de ocorrência rara).

Aglutinação Negativa



Se não ocorreu aglutinação no poço marcado “patient Test”, (veja exemplo de aglutinação negativa acima), o paciente é DEA 1 negativo

Importador: JMR Trading Ltda
CNPJ: 11.857.347/0001-71
Nº Registro no MAPA: 117/10-PR
Endereço: Rua Santa Alves Petra, 173
CEP: 83.325-170 Pinhais-Paraná-Brasil
Responsável Técnica: CRMV PR nº3288
Margareth Carvalho S. Agottani
SAC: info@jmrtrading.com.br
www.vpdiagnostico.com.br

dmslaboratories, inc.
2 Darts Mill Road, Flemington, NJ 08822
Tel: (908) 782-3353 / 800 567-4367
Fax: (908) 782-0832
www.rapidvet.com
Rev. 04/04/2014