


RapidVet[®]-H

Tipagem Sanguínea de Felinos

Guia de interpretação

POSITIVO PARA AGLUTINAÇÃO

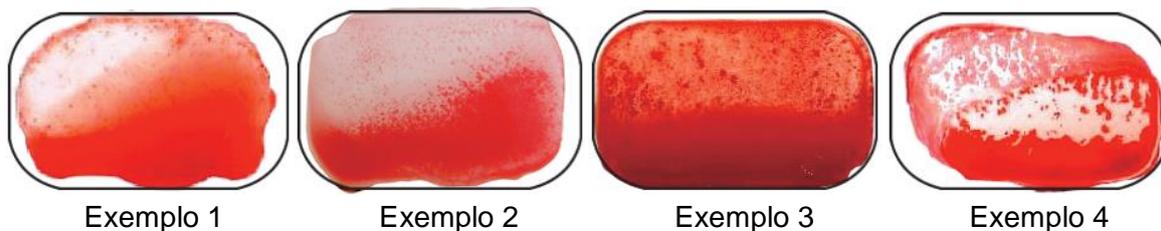

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Se o teste for executado corretamente, uma visível aglutinação (observar os diversos exemplos positivos acima) deve ocorrer em pelo menos um dos poços marcados como (Patient Test). O poço denominado "Auto-agglutination Pre-Screen" não deve resultar em aglutinação. (Auto-aglutinação é de ocorrência rara).

Se a amostra do paciente aglutinar no poço marcado como "Type A", o animal testado possui sangue do grupo A. Nesse caso, o poço marcado como "Type B" será negativo para aglutinação (observar o exemplo de amostra NEGATIVA na ilustração abaixo).

Se a amostra do paciente aglutinar no poço marcado como "Type B", o animal testado possui sangue do grupo B. Nesse caso, o poço marcado como "Type A" será negativo para aglutinação.

Se a amostra do paciente aglutinar em ambos os poços, o sangue do animal testado será do grupo AB.

AMOSTRA NEGATIVA PARA AGLUTINAÇÃO

