

# RapidVet®-H (Feline A, B & AB) Instructions for Use


Dispensar 1 gota de Diluente no poço Auto-Agglutination. Gotejar 1 gota do sangue do paciente no mesmo poço. Misturar por 10 segundos utilizando um misturador.

Dispensar 1 gota de diluente nos outros poços


Dispensar 1 gota do sangue do paciente no poço marcado Type A e Type B

Com o misturador misturar material do poço Type A por 10 segundos. Com misturador NOVO misturar o poço Type B


## Auto-Agglutination Pre-teste

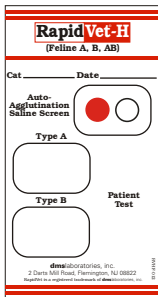


### Step 1:

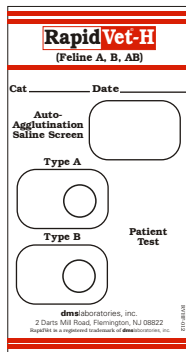

### Step 2:

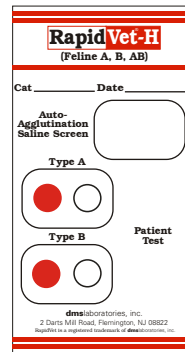

### Step 3:

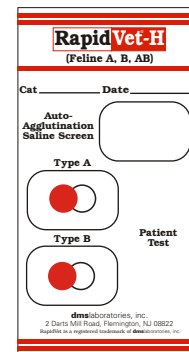

Se não ocorreu a aglutinação no poço, pode-se prosseguir com o teste.


Adicionar uma segunda gota de diluente no poço marcado Type A. NÃO misturar com o misturador.

Gentilmente homogeneize o cartão por 2 minutos.


Posicione o cartão em angulo de 10° - 20° an

Ler os resultados:


### Step 4:

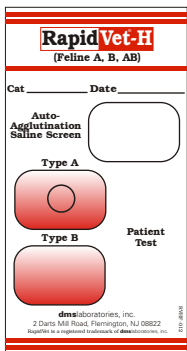

### Step 5:

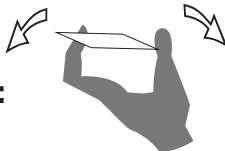

### Step 6:

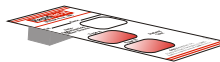

### Step 7:

Ver o cartão de interpretação