

RapidVet[®]-H

Kit teste para tipagem sanguínea em felinos

dms laboratories, inc.
The RapidVet[®] Company

www.rapidvet.com




Contatos:
(41)37792130
info@jmrtrading.com.br
www.vpdiagnostico.com.br

RapidVet[®]-H

Sistema para identificação de tipos sanguíneos “A”, “B” e “AB” em felinos



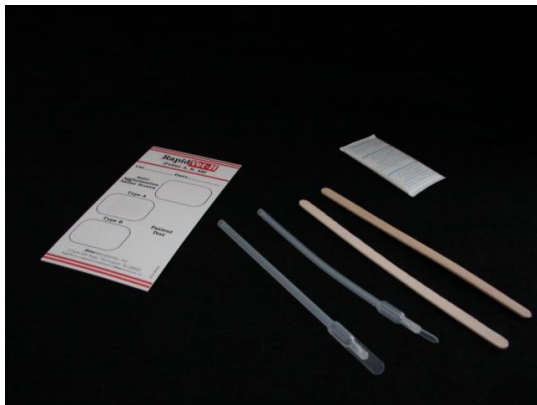


RapidVet-H Feline blood:

- Cartão de tipagem;
- Pipetas;
- Misturadores;
- Diluente;
- Sache com silica gel.

* o diluente está incluso no kit apesar de não estar na foto.


Técnica

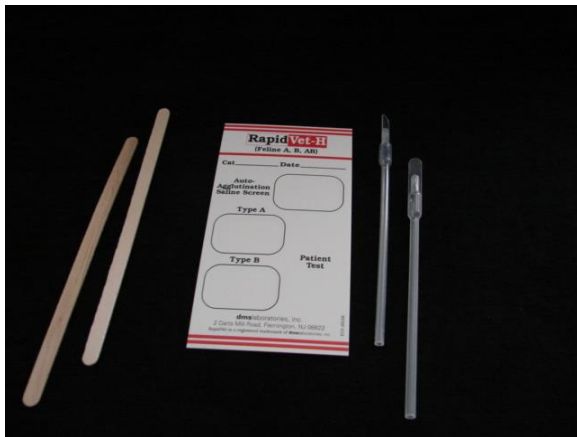


Passo 1: Escreva o nome do gato e a data do teste no cartão.




Passo 2: Deposite uma gota do diluente que acompanha o kit no campo “*Auto-Agglutination*”.

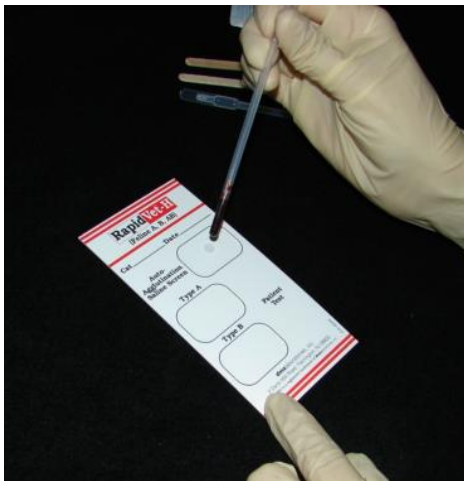

Passo 3: Aspire a amostra de sangue do paciente utilizando a pipeta e goteje uma gota no campo “Auto-Agglutination”.

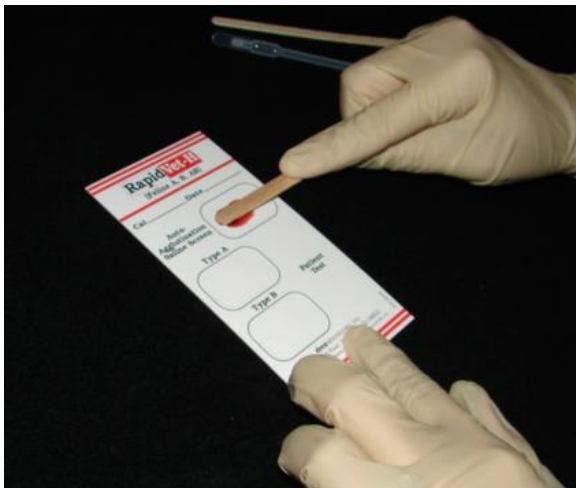



Passo 4: Misture o material no campo por 10 segundo usando o lado plano do misturador.

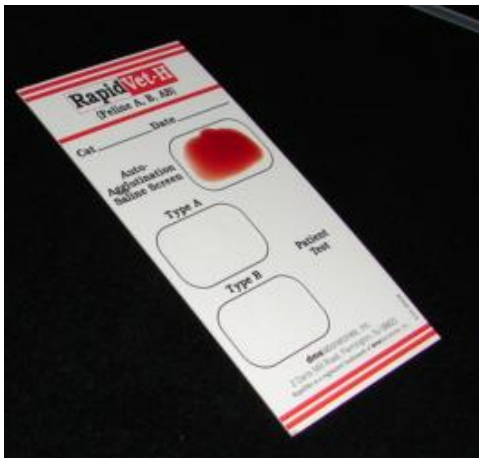

Passo 5: Se não for observada aglutinação no campo “Auto-Agglutination”, prossiga o teste.
Se a amostra de sangue aglutinar recomenda-se “lavar” as células antes do procedimento de tipagem.



Passo 6: Goteje uma gota de diluente em cada um dos campos restantes no cartão teste.

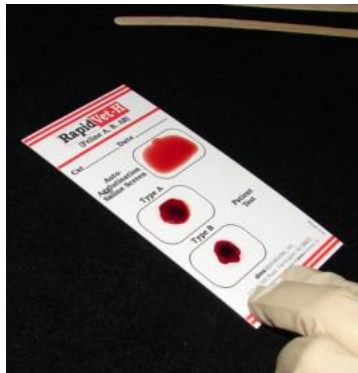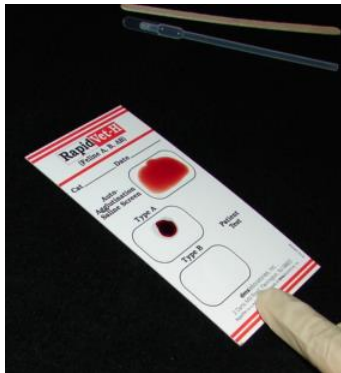

Passo 7: Aspire a amostra de sangue do paciente com a pipeta e deposite uma gota em cada campo , campo “A” e campo “B” cuidadosamente para que não haja contaminação cruzada entre os campos.



Passo 9: Usando um novo misturador homogeneizar bem o material no campo “Tipo A ” por 10 segundos.



Passo 9: Usando um novo misturador homogeneizar bem o material no campo “Tipo B ” por 10 segundos.



Passo 10: Adicione a segunda gota de diluente ao campo “tipo A”.
Não misture novamente com o misturador.



Passo11: Mova o cartão de maneira a misturar os materiais por rotação leve do punho. Observe se os materiais estão misturando e girando dentro de cada campo. Balançar o cartão por 1 minuto ou até que a aglutinação ocorra.



Passo 12: Leia o resultado e anote em que poço ocorreu a aglutinação. Incline o cartão teste em um ângulo entre 10 e 20 graus até secar.

Passo 13: Após a leitura fotografe o cartão e guarde-o, em uma capa plástica para que o registro possa ser mantido permanentemente.