

dmslaboratories, inc.

2 Darts Mill Road
Flemington, New Jersey 08822
Tel.: (908) 782-3353
(800) 567-4DMS (4367)
Fax: (908) 782-0832
E-Mail dms@rapidvet.com
Web Site: www.rapidvet.com

Se a amostra do paciente auto-aglutinou, as células vermelhas deverão ser lavadas antes de prosseguir com o teste de Tipagem sanguínea RapidVet-H. Para a lavagem utilizar PBS – Salina Tamponada do Laboratório **NÃO** utilizar o diluente PBS incluído no kit do teste

LAVAGEM DAS HEMÁCIAS

1. Centrifugar a amostra de sangue 1000xg ou 2300 RPM por 3 minutos.
2. Descartar o sobrenadante utilizando uma pipeta limpa.
3. Adicionar no sedimento das hemácias, Salina Fosfatada Tamponada a pH 7.0-7.4 (PBS), na proporção 1:1
4. Homogeneizar delicadamente.
5. Centrifugar por aproximadamente 30-60 segundos
6. Descartar sobrenadante com uma pipeta
7. Repetir os itens 3, 4, 5 e 6 aproximadamente 3 vezes
8. Misturar as células na proporção 1:1 com PBS
9. Repetir o teste no poço de auto-aglutinação.
Se auto-aglutinar, repetir o procedimento de lavagem.
Se não auto aglutinar proceder ao teste de tipagem.

OBS.: **não são frequentes casos de amostras que auto-aglutinam**

dmslaboratories, inc.

2 Darts Mill Road
Flemington, New Jersey 08822
Tel.: (908) 782-3353
(800) 567-4DMS (4367)
Fax: (908) 782-0832
E-Mail dms@rapidvet.com
Web Site: www.rapidvet.com

Importador: JMR Trading Ltda

CNPJ: 11.857.347/0001-71

Nº de Registro no MAPA: 117/10-PR
Endereço: Rua Santa Alves Petra, 173
CEP: 83.325-170 Pinhais-Paraná- Brasil
Responsável Técnica: CRMV PR nº3288
Dra. Margareth Carvalho S. Agottani
SAC: info@jmrtrading.com.br