

PLACA DE AQUECIMENTO



SIMPLES E FÁCIL DE USAR!



Uma nova ferramenta desenvolvida para reduzir o tempo de aquecimento das placas de reação dos kits VacchiCheck® e demais kits ImmunoComb®.



Equipamento compacto que pode ser plugado em uma unidade USB de seu computador permitindo alcançar a temperatura ideal em cerca 10 minutos.

Especificações:

Código do produto: 60ICW100

Dimensões: 150 x 45 x 10 mm

Peso: 98 g

Potência: 5V/1,4A

Material: PVC

Conectividade: USB

Código HS: 8516

Procedimento:

1. Conecte a placa de aquecimento em uma porta USB de seu computador.

ATENÇÃO! Não conecte a placa em carregadores de celular ou qualquer outro dispositivo de carga direto em tomada de parede.

2. Retire a placa reveladora do kit ImmunoComb® desejado e coloque-a em cima da demarcação em azul do dispositivo de aquecimento.

3. Pressione o botão de início. A unidade será ligada e uma luz vermelha indicará o início do aquecimento.

4. Após 10 minutos, a placa desligará automaticamente.

5. Remova a placa reveladora da placa de aquecimento e proceda com as etapas do kit ImmunoComb®.



Biogal – Galed Labs. ACS. Ltd.
Kibbutz Galed, 19240000, Israel
Tel: 972-4-9898605 · Fax: 972-4-9898690
E-mail: info@biogal.co.il
Site: www.biogal.co.il



VP Diagnóstico Distribuidora.
Rua Mandaguari, 1752, Pinhais – PR.
Tel: (41) 3434-2721 / 3779-2130
Email: info@vpdiagnostico.com.br
Site: www.vpdiagnostico.com.br