

EXTRAÇÃO DE RNA

Protocolo de início rápido para extração de RNA viral para sangue*

*Para informações adicionais consulte as Instruções de Uso. Cat. No. 30PRE308/316

1. Adicione 200 µl sangue em tubo de 2 ml para microcentrífuga




2. Adicione 600 µl de tampão de RNA viral. Misture bem.



3. Coloque a coluna no tubo de coleta. Transfira a amostra do passo 2



4. Centrifugue (10,000 x g) por 1 min.

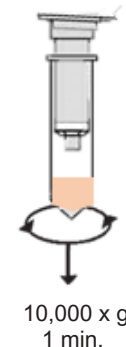


5. Descarte o tubo de coleta com seu conteúdo



6. Coloque a coluna em um novo tubo de coleta. Adicione 500 µl de solução tampão de lavagem viral.



7. Centrifugue (10,000 x g) por 2 min.

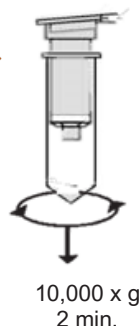


8. Descarte o tubo de coleta com seu conteúdo.



9. Transfira a coluna para um tubo de 1,5 ml. Adicione 20 µl de tampão de eluição.



10. Centrifugue (10,000 x g) 30 seg

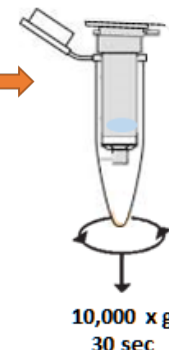

O RNA extraído deve ser utilizado o mais breve possível, mas pode ser conservado por 24 horas a 4°C, por duas semanas a -20°C ou por um período mais prolongado a -70°C.

