




Guia Rápido ^(30CDR108) Cinomose kit PCRun[®] para Detecção Molecular RNA

Componentes

Embalagem
de alumínio

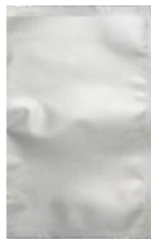

Buffer
PCRun



Dispositivo
de detecção



Ajuste a temperatura
para 60° C



Destaque a quantidade de
tubos conforme amostras



Dispense 15µl de Buffer PCRun



Incube em temperatura ambiente
por 1 minuto, para permitir que o
pellet se dissolva completamente

Adicionar
no tubo 5µl
RNA extraído

AGITE O TUBO
para dissolver
o pellet




Aquece 60° C
60 min



Analise com o aparelho de detecção



O RNA extraído deve ser utilizado o mais breve possível, mas pode ser conservado por 24 horas a 4°C, por duas semanas a -20°C ou por um período mais prolongado a -70°C.

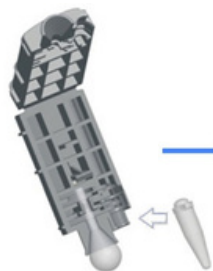

Coloque o tubo de reação no
cartucho Amplicon



Feche o
cartucho



Coloque o cartucho na
câmara de detecção



Feche o dispositivo



Pressione até fechar

15 min



Leia os resultados



C linha controle
T linha teste