


RapidVet®-H

Canine Blood Typing

Interpretação do Teste Canino


Exemplos de Aglutinação Positiva

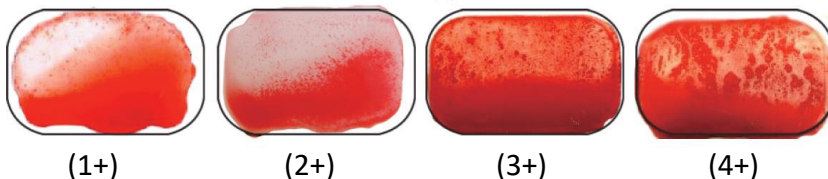

O teste só é considerado válido se tiver ocorrido aglutinação visível no poço "Positive Control" (exemplos acima). As imagens acima servem de referência tanto para aglutinações no poço "Positive Control" como para o poço "Patient Test".

Se a amostra do paciente aglutinou no poço marcado "Patient Test" o cão é DEA 1 positivo. No poço "Auto-agglutination Saline Screen" não ocorreu aglutinação. (Auto-aglutinação é de ocorrência rara).

Aglutinação Negativa

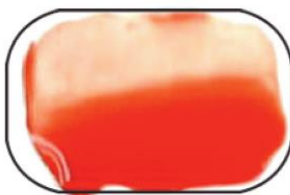

Se não ocorreu aglutinação no poço marcado "Patient Test", (veja exemplo de aglutinação negativa acima), o paciente é DEA 1 negativo.

Importador: JMR Trading Ltda
CNPJ: 11.857.347/0001-71
Nº Registro no MAPA: 000017-5
Endereço: Rua Mandaguari 1752
CEP: 83.325-015 Pinhais-Paraná-Brasil
Responsável Técnica: CRMV PR nº3288
Margareth Carvalho S. Agottani
SAC: info@vpdiagnostico.com.br
www.vpdiagnostico.com.br

dmslaboratories, inc.
2 Darts Mill Road, Flemington, NJ 08822
Tel: (908) 782-3353 / 800 567-4367
Fax: (908) 782-0832
www.rapidvet.com