

PLACA DE AQUECIMENTO



SIMPLES E FÁCIL DE USAR!



Uma nova ferramenta desenvolvida para reduzir o tempo de aquecimento das placas de reação dos kits VacchiCheck® e demais kits ImmunoComb®.



Equipamento compacto que pode ser plugado em uma unidade USB de seu computador.

Recomendação: deixar a placa de reação dos kits por **30 minutos em temperatura ambiente (20 a 25 °C)** e **+ 10 minutos na placa que aquecimento.**

Especificações:

Código do produto: 60ICW100

Dimensões: 150 x 45 x 10 mm

Peso: 98 g

Potência: 5V/1,4A

Material: PVC

Conectividade:USB

Código HS: 8516

Procedimento:

1. Conecte a placa de aquecimento em uma porta USB de seu computador. **ATENÇÃO!** Não conecte a placa em carregadores de celular ou qualquer outro dispositivo de carga direto em tomada de parede.
2. Retire a placa reveladora do kit ImmunoComb® desejado deixe por 30 minutos em temperatura ambiente (20 a 25 °C) e em seguida coloque-a em cima da demarcação em azul do dispositivo de aquecimento.
3. Pressione o botão de início. A unidade será ligada e uma luz vermelha indicará o início do aquecimento.
4. Após 10 minutos, a placa desligará automaticamente.
5. Remova a placa reveladora da placa de aquecimento e proceda com as etapas do kit ImmunoComb®.



Biogal–GaledLabs. ACS. Ltd.
KibbutzGaled, 19240000, Israel
Tel: 972-4-9898605 · Fax: 972-4-9898690
E-mail:info@biogal.co.il
Site: www.biogal.co.il



VPDiagnósticoDistribuidora.
RuaMandaguari,1752,Pinhais –PR.
Tel: (41)3434-2721/ 3779-2130
Email: info@vpdiagnostico.com.br
Site: www.vpdiagnostico.com.br